

# Guide rapide d'utilisation

## scil vIP Link

### ► Communication RS232 (Port COM)

Réf. 7044 = Adaptateur USB <-> 1 port COM

Réf. 7042 = Adaptateur USB <-> 4 ports COM

Analyseurs avec ports COM	Références câbles de transfert
scil Vet abc	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7013 (2m)</li> <li>• 7005 (5m)</li> <li>• 7021 (10m)</li> </ul>
SPOTCHEM™ EZ SPOTCHEM™ EL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1970 (2m)</li> <li>• 1983 (5m)</li> <li>• 1984 (10m)</li> <li>• 2020 (15m)</li> </ul>
Pocketchem	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 11664</li> </ul>
scil Reflovet® Plus Reflotron®	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6861 (2m)</li> <li>• 6862 (5m)</li> <li>• 6863 (10m)</li> </ul>

### ► Communication réseau (RJ45/Ethernet)

Réf. 1813 = Switch RJ45 <-> Offre 4 ports supplémentaires

=> A fournir automatiquement avec un câble RJ45 1m et RJ45 2m. Si le switch n'est pas utilisé, le représentant scil le récupérera.

Réf. 7359 câble RJ45 <-> 1m

Réf. 7062 câble RJ45 <-> 2m

Réf. 7064 câble RJ45 <-> 5m

Réf. 7351 câble RJ45 <-> 10m

Réf. 7352 câble RJ45 <-> 15m

Analyseurs RJ45	Commentaires
PT10V	Option dongle wifi (Réf.104867)
scil Vet abc Plus*	
QuickVet	
Un adaptateur USB <-> RJ45 doit-être connecté. (une des deux prises USB sera occupée). L'adaptateur est fourni d'origine avec un LINK.	

## ► Communication USB

Réf. 105778 = HUB USB <-> Offre 4 ports USB supplémentaires

Réf. 7360 Câble USB <-> 3m

Analyseurs avec port USB
SOLO
VetScan® VS2
VetScan HM5™


## ► Branchement scil vIP Link

scil vIP Link propose 4 ports USB.


Merci de laisser libres les deux ports USB situés à l'avant de l'appareil.

Si il est nécessaire d'utiliser plusieurs ports USB, merci d'ajouter le HUB USB référence 104592.


## CAS n°1 : COM et USB

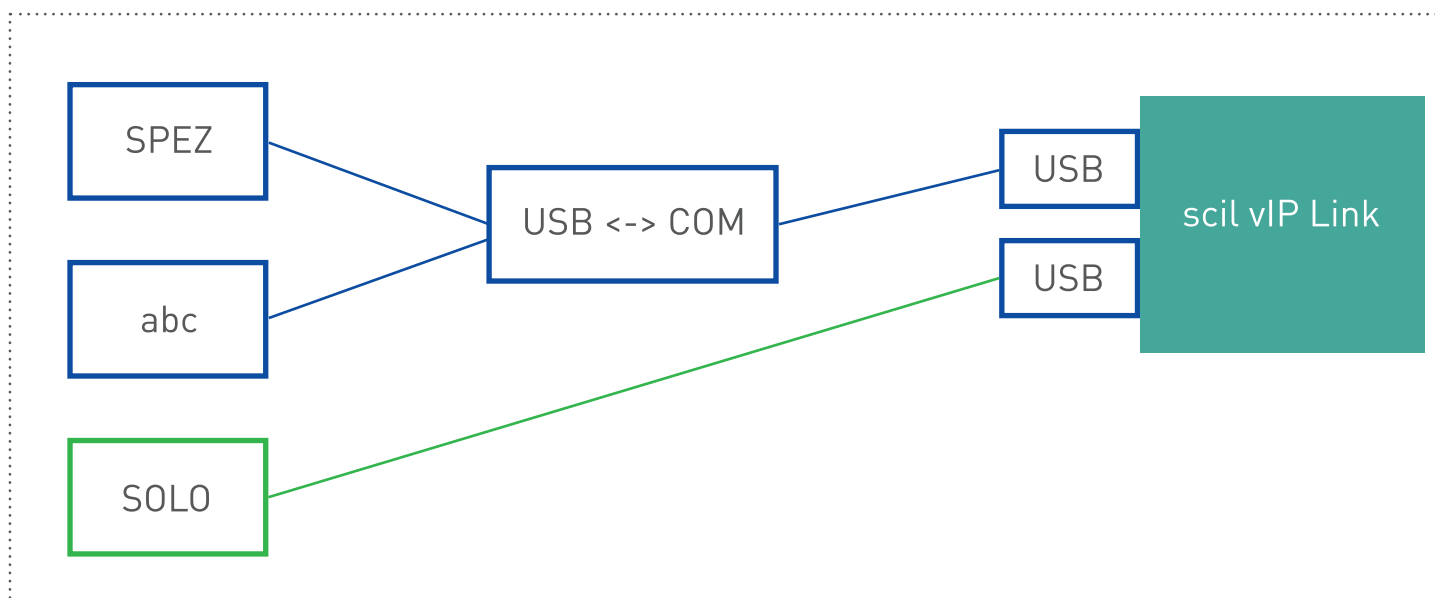

## CAS n°2 : COM et RJ45

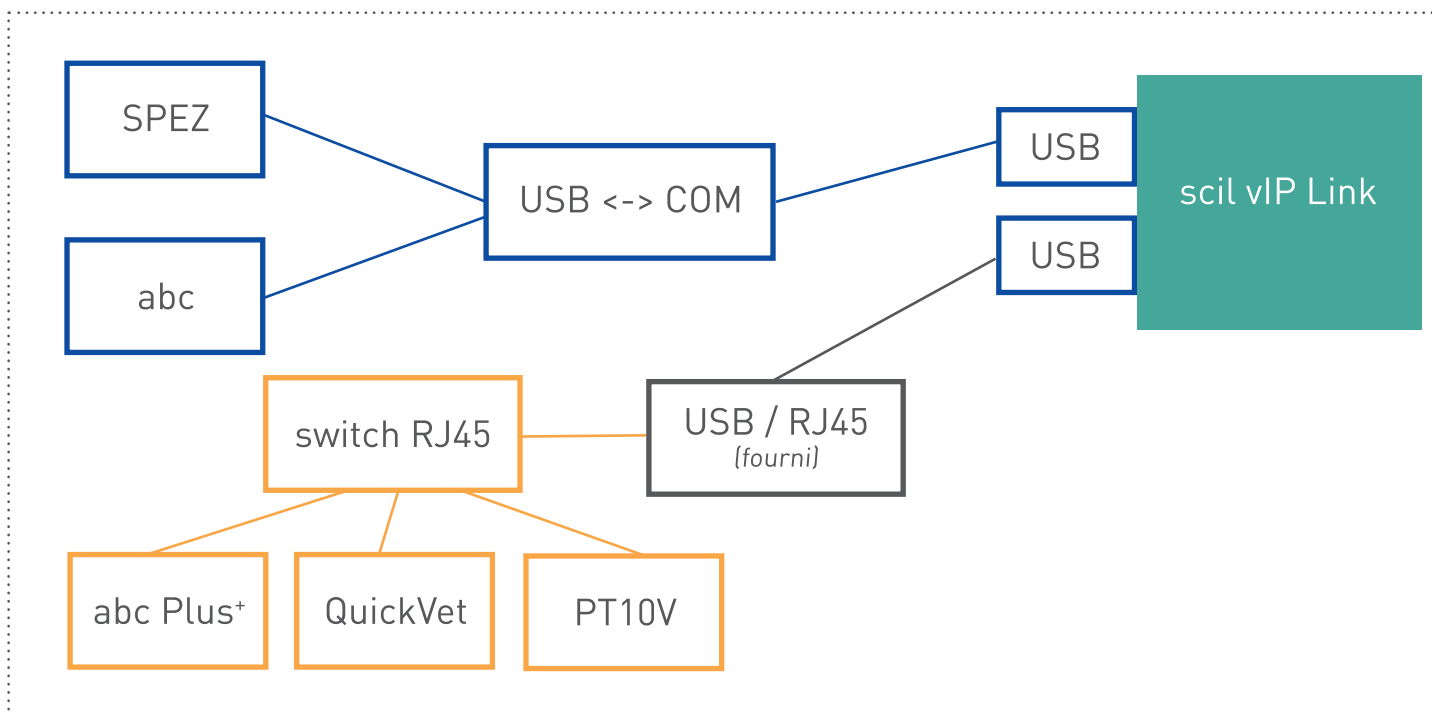

## CAS n°3 : COM, RJ45 et USB

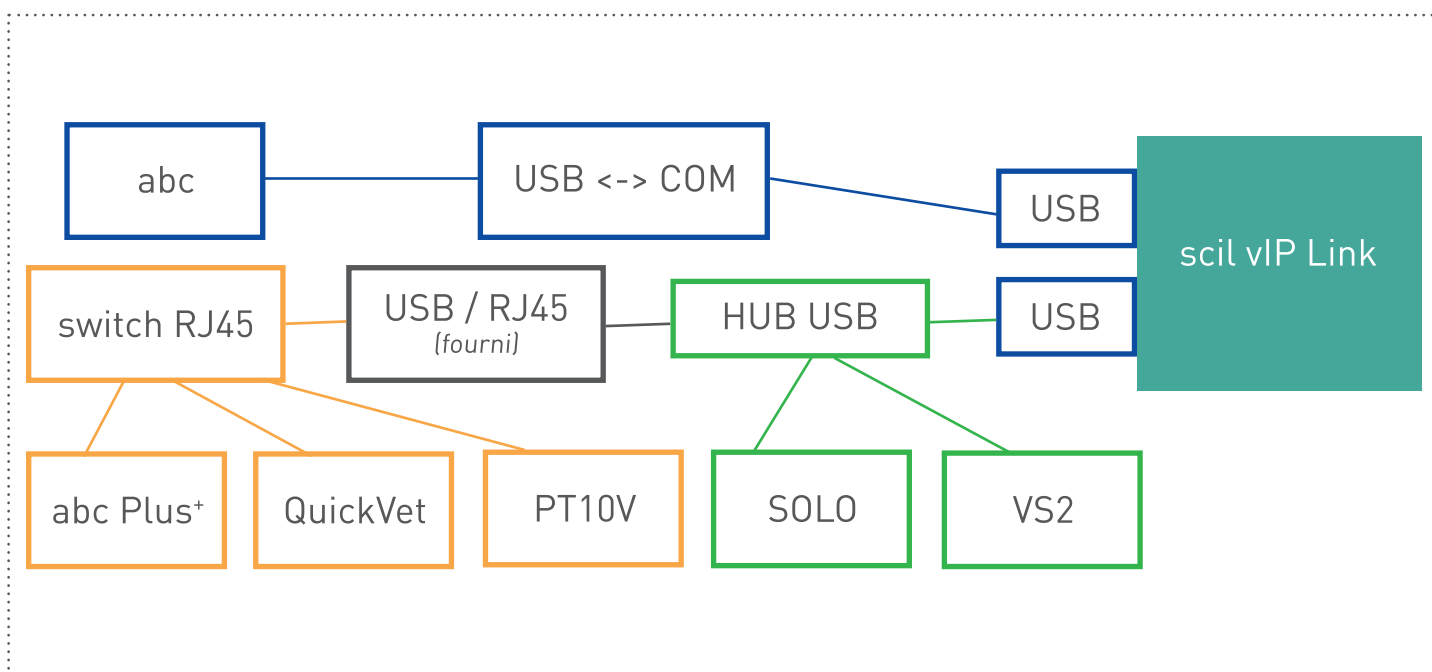

scil animal care company France

Parc Activeum - 3 rue Jacqueline Auriol - 67 120 Altorf - Tél : +33 (0)3 90 20 16 40 - Fax : +33 (0)3 90 20 16 45  
E-mail : info-fr@scilvet.com - www.scilvet.fr