

ÉTAPES PRÉANALYTIQUES

scil Vet SA

SÉDIMENTATION RAPIDE DES PARTICULES D'URINE

En particulier : **cristaux et cellules.**

- La sédimentation se produit en 1 minute.
- Les particules peuvent sédimenter dans la lame.

- >> Homogénéiser l'échantillon avant aspiration.
- >> Placer rapidement la cartouche dans l'analyseur scil Vet SA.

ÉTAPES PRÉANALYTIQUES À SUIVRE :

1. Allumer scil Vet SA et entrer les données du patient.
2. **Homogénéiser l'échantillon** en retournant délicatement le tube à plusieurs reprises.
3. Prélever **20 µL d'urine** dans la zone centrale du tube.
4. **Déposer l'échantillon** dans la lame et insérer la lame dans la fente de l'analyseur.
5. Lancer rapidement la **mesure**.

URINE FRAÎCHE

Urine fraîche à utiliser dans les 30 minutes afin d'éviter :

- la formation de nouveaux cristaux ou dissolution,
- la destruction des globules rouges => hémolyse,
- la dégénération cellulaire.

BONNES PRATIQUES

- Réaliser une analyse avec une batterie chargée à plus de 50%.
- Quitter l'écran de mesure après l'analyse.
- En cas de non-utilisation, éteindre l'analyseur.